

Manschetten und Verbindungsstecker im Überblick

1. Übersicht verfügbarer Manschettengrößen zu Ihrem Oberarm-Blutdruckmessgerät

Um eine valide Messung zu erhalten, ist die richtige Manschette Voraussetzung. Um die passende Manschettengröße zu ermitteln, messen Sie Ihren Oberarmumfang mit einem Maßband. Legen Sie das Maßband dafür an der dicksten Stelle Ihres Oberarmes an.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über alle verfügbaren Größen (alle Manschetten sind mit allen Oberarm-Modellen kompatibel). Sie können sie in Ihrer Apotheke vor Ort über die Pharmazentralnummer (PZN) beziehen.







| Ihr Oberarmumfang | Manschettengröße | Höhe der Manschette | Bestellbar über | empf. UVP |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 17 - 22 cm | S (Softmanschette) | 12 cm | PZN 00588938 | 17,95 € |
| 22 - 32 cm | M (Softmanschette) | 15 cm | PZN 03082406 | 17,95 € |
| 22 - 42 cm | M-L (Softmanschette) | 15,5 cm | PZN 03774363 | 17,95 € |
| 22 - 42 cm | M-L (Hartschalenmanschette) | 15,5 cm | PZN 03682566 | 24,95 € |
| 32 - 52 cm | L-XL (Softmanschette) | 17 cm | PZN 09265409 | 17,95 € |

Tipp: Insbesondere wenn mehrere Personen in Ihrem Haushalt mit Ihrem Gerät messen, lohnen sich unter Umständen die Zwischengrößen M-L oder L-XL.

Hinweis: Der passende Verbindungsstecker zu Ihrer neuen Manschette ist im Lieferumfang der neuen Manschette enthalten. Alle Manschetten sind sowohl mit der 3. als auch der früheren 2. Gerätegeneration kompatibel (siehe Rückseite).

2. Übersicht über Verbindungsstecker (nur für Einzelnachbestellungen OHNE Manschette)

Welcher Verbindungsstecker an Ihrem Gerät passt, hängt von der Gerätegeneration/ vom Alter Ihres Blutdruckmessgeräts sowie von der verwendeten Manschettengröße ab.

| Wie sieht Ihr aktueller Verbindungsstecker aus? | passend für | WEPA-Best.-Nr. |
|---|---|----------------|
|  blau-gelb | 3. Gerätegeneration Manschettengröße S | 046917 |
|  blau-grau | 4. Gerätegeneration Manschettengröße S | 047273 |
|  grau (L-Form) | 2. Gerätegeneration Manschettengröße S 4. Gerätegeneration Manschettengrößen M/M-L | 047153 |
|  weiß-gelb | 3. Gerätegeneration Manschettengrößen M/M-L | 046918 |
|  schwarz-gelb | 3. Gerätegeneration Manschettengrößen L-XL | 046919 |
|  schwarz-grau | 2. + 4. Gerätegeneration Manschettengrößen L/L-XL | 047277 |